

Saver One

ΑΕΑ Δημόσιας Χρήσης

Ένας νέος ανθεκτικός φιλικός αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής, για δημόσια χρήση, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο οποιονδήποτε, οπουδήποτε.



Ένας έξυπνος ΑΕΑ με οδηγίες ΚΑΡΠΑ πλήρως εξελληνισμένος με απλά βήματα απινίδωσης ιδανικός για σχολεία, ξενοδοχεία, σταθμούς, γυμναστήρια, εμπορικά κέντρα κλπ.
Μακράς διάρκειας Μπαταρίες
5 χρόνια Εγγύηση



Vasco Medical
Ταξιαρχών 36 Α Καλαμάκι Αθήνα
Τηλ 2109834733 Φαξ 2109847016



Παντού για τη Ζωή

Αυτόματος και Ημιαυτόματος AEA με 1, 2, -3 βήματα λειτουργίας (ενεργοποίηση, εφαρμογή ηλεκτροδίων, - σοκ)

Στιβαρός, μικρός και ελαφρύς (<2 kg)

με εργονομική χειρολαβή

Καινοτόμα και έξυπνη κατασκευή

Ενσωματωμένος μετρονόμος για την

καθοδήγηση ΚΑΡΠΑ

2 ενεργειακές εκδόσεις: Τυπικό max

200 Joules ή Power max 360 Joules

Προσαρμοζόμενα Πρωτόκολλα Ενηλίκων

Αυτόματες αυτοδιαγνώσεις με ενδεικτικά LED

για τη συσκευή και την μπαταρία

Επιλογές μακράς διάρκειας μπαταρίας για

βέλτιστη φορητότητα

Κατάλληλο για ενήλικες (>8 έτη ή >25Kg) και

παιδιά (1+8 ετών ή <25Kg)

Αναλώσιμα πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια με

30 μήνες αυτονομία

Πολλαπλές δυνατότητες διαμόρφωσης

Σύμφωνο με τις AHA/ERC 2015 οδηγίες

Αναβαθμίζεται απλά από το χρήστη με ένα καλώδιο USB όταν τα πρωτόκολλα αλλάζουν

5 Χρόνια Εγγύηση



A.M.I. ITALIA Srl

Γραφεία: Viale Gran Sasso, 11
20131 Milano - Italy
Tel: +39.02.20509246
Fax: +39.02.29520839

Γραφεία για Παραγωγή: Cupa Reginella, 15
80010 Quarto - Italy
Tel: +39.081.8060574
Fax: +39.081.8764769

info@amiitalia.com
www.amiitalia.com

AEDs MADE in ITALY

Rev.19 A2/2017 Κατοχυρωμένα Δικαιώματα
Οι προδιαγραφές μπορούν να αλλάξουν χωρίς
ειδοποίηση



Vasco Medical
Ταξιαρχών 36 Α
Καλαμάκι Αθήνα
Τηλ: 2109834733
Φαξ: 2109847017
info@vascomedical.gr
www.vascomedical.gr

SAVER ONE

everywhere for life

Φιλικός προς το χρήστη Δημόσιας Πρόσβασης Απινιδωτής (PAD) αξιόπιστος για κάθε διασώστη (ακόμη και χωρίς την ελάχιστη κατάρτιση) είναι έτοιμος να σώσει τη ζωή θυμάτων που επλήγησαν με ξαφνική καρδιακή ανακοπή (SCA). Σχεδιασμένο για να βοηθήσει να σωθούν ζωές σε οποιοδήποτε δημόσιο συνθήκες και βελτιστοποιημένος για ταχεία απινίδωση, οποτεδήποτε πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ

Πρακτικός και πολύ απλός στη χρήση. Πολύ έξυπνος με εικονογράμματα και εικονίδια που αναβοσβήνουν και σαφή φωνητικά μηνύματα και μηνύματα κειμένου στη νέα mini LCD οθόνη του καθοδηγεί και υποστηρίζει τον κοινό διασώστη σε κάθε βήμα για αποτελεσματική διάσωση. (πλήρως εξελληνισμένος)

Άνευ Συντήρησης

Πραγματοποιεί αυτόματα καθημερινούς, μηνιαίους και εξαμηνιαίους αυτοελέγχους των εσωτερικών κυκλωμάτων, του συστήματος απινίδωσης, διαμετρήματος και χωρητικότητας μπαταρίας. Επιπλέον αυτοελέγχοι κατά την εισαγωγή μπαταρίας και της ενεργοποίησης της συσκευής από τον χρήστη. Οπτικοί ενδείκτες κατάστασης δείχνουν με μια ματιά αν συσκευή και μπαταρία είναι έτοιμα προς χρήση.

Καθοδήγηση ΚΑΡΠΑ

Φωνητικές οδηγίες, κείμενα και εικονογράμματα βοηθούν τους διασώστες κατά τη διάρκεια της ΚΑΡΠΑ, παρέχοντας σαφείς οδηγίες με έναν μετρονόμο για τον κατάλληλο αριθμό και συχνότητα των θωρακικών συμπίεσεων.



Απινιδωτής

Κυματομορφή: Προσαρμοσμένη BTE (Διασική Εκθετική Περιεκτική)
Τύπος Ενέργειας: Μεταβλητός από 50 σε 360J
AED Ενέργεια: σταθερή 50J παιδιατρική 150, 200J ενηλίκων standard (προϋποβλεπόμενη πρωτόκολλα απινίδωσης)
200, 250, 360J ενηλίκων Power (προϋποβλεπόμενα πρωτόκολλα απινίδωσης)
Απεικόνιση Ενέργειας: Η οθόνη πληροφορεί για την ενέργεια απινίδωσης
ΑΕΑ λειτουργία: Ημιαυτόματος (αυτόματος στην αυτόματη έκδοση). Αυτόματα αναλύει, φορτίζει και παρέχει απινίδωση στο προκαθορισμένο επίπεδο ενέργειας
Χρόνος φόρτισης: ≤9 sec. σε πλήρη ενέργεια
Αλγόριθμος: ένας έξυπνος αναγνώστης της αρρυθμίας αξιολογεί την αντίσταση του θώρακα και καθορίζει την απαίτηση της απινίδωσης.
Ρυθμοί Απινίδωσης: Ventricular Fibrillation (VF) και wide complex Ventricular Tachycardia (VT)
Χρόνος Ανάλυσης: EN 60601, από 4 - 15 sec
Αντίσταση: 20-200 ohms
Ευαισθησία: EN 60602-2-4 (AHADB, MITDB), 97%
Εξειδίκευση: EN 60602-2-4 (AHADB, MITDB), 99%
Έλεγχος: ON/OFF, Κουμπί απινίδωσης, Ενδείκτες Συμβουλών:

Εικονίδια «σύνδεσης ηλεκτροδίων» αναβοσβήνει για προειδοποίηση ότι τα ηλεκτρόδια πρέπει να τοποθετηθούν στον ασθενή ή ότι δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά ή παρουσιάζουν πρόβλημα στην αγωγιμότητα
Εικονίδια «Μην αγγίζετε τον ασθενή» προειδοποιεί τους παρευρισκόμενους να μείνουν μακριά από το θύμα κατά τη διάρκεια της ανάλυσης ή του σοκ.

Εικονίδια «Αγγίξτε τον ασθενή» ενημερώνει τους παρευρισκόμενους ότι μπορούν να αγγίξουν με ασφάλεια το θύμα.

Εικονίδια «Ενήλικα/Παιδί» ενημερώνει για τον τύπο των ηλεκτροδίων που συνδέθηκαν (ενηλίκων ή παιδιατρικά)
Ενδείκτες Κατάστασης: LED για κατάσταση συσκευής και ενδείκτης (στη mini LCD οθόνη) για τη κατάσταση της μπαταρίας

Mini LED οθόνη για παρουσίαση μηνυμάτων (εξελληνισμένων) με κατάσταση μπαταρίας, οδηγίες ΚΑΡΠΑ, κατάσταση συσκευής.
Κουμπί INFO για παρουσίαση πληροφοριών περί της συσκευής και εύκολη εναλλαγή γλώσσας.

Καταγραφή δεδομένων

Εσωτερική 1 Gbit (128 Mb) μνήμη για καταγραφή 6 ωρών πλήρως περιστατικών (με ενεργοποιημένο μικρόφωνο, ΗΚΓ, γεγονότα και περιβαλλοντικές καταγραφές)
Προαιρετική μνήμη έως 2 GB (για περισσότερο από 100 ώρες καταγραφής περιστατικών)
Δεδομένα: "AEDFILES" με πλήρη καταγεγραμμένα γεγονότα και "AED1LOG" φάκελλο με πλήρη δραστηριότητα αυτοελέγχων
Όλες οι καταγραφές AED1LOG αναγνωρίζονται από οποιοδήποτε PC ενώ οι καταγραφές περιστατικών AEDFILES εμφανίζονται μέσω της προαιρετικής εφαρμογής "Saver View Express"
Επικοινωνίες: Θύρα USB

Επιλογές Μπαταρίας

Τύπος: Li-Ion Accumulator (επαναφορτιζόμενη) (code SAV-C0011)
Χρόνος επαναφόρτισης: 2,5 ώρες με φορτιστή (code SAV-C0014) (θερμοκρασία 20°C)
Αυτονομία: 250 σοκ για πλήρως φορτισμένη συσκευή στα 200 J ή 150 σοκ στα 360 J (θερ. 20°C)
Διάρκεια: 2,5 έτη ή 300 επαναφορτίσεις (θερ. 20°C)

Τύπος: LiSOCl2 αναλώσιμη (code SAV-C0903)
Αυτονομία: 300 σοκ για μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία στα 200 J ή 200 σοκ για μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία στα 360 J (θερμοκρασία 20°C)
Διάρκεια Ζωής σε λειτουργία (stand by): 5 έτη (θερ. 20°C)
Διάρκεια Ζωής σε αποθήκευση: 8 έτη στη συσκευασία της (θερ. 20°C)

Φυσικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις: 26,5 x 21,5 x 7,5 cm
Βάρος: 1,95 kg με αναλώσιμη μπαταρία ή 2,10 kg με επαναφορτιζόμενη
Εξωτερικό Κέλυφος: Ιατρικής βαμίδας ABS
Ασφάλεια ασθενούς: Όλες οι συνδέσεις προς τον ασθενή είναι απόλυτα μονωμένες
Οδηγία 2007/47/EC: Class lib

Επιλογές Ηλεκτροδίων

Τύπος: Αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια με γέλη, αυτοελεγχόμενα ως προς την αγωγιμότητα.
Ενηλίκων: Επιφάνεια 81cm² (code SAV-C0846)
Παιδών: Επιφάνεια 31cm² (code SAV-C0016)
Μήκος καλωδίου 1,20 m

Περιβαλλοντολογικά

Θερμοκρασία: λειτουργίας: 0° C to 55° C
Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -35°C to 60°C
24 ώρες από θερμοκρασία δωματίου σε ακραίες συνθήκες: -35°C to 60°C
Υγρασία: 0% to 95% σχετική μη συμπυκνωμένη υγρασία
Σκόνη /Αδιάβροχη προστασία: IEC 60529, IP54
Ηλεκτρική αποφόρτιση: EN 61000-4-2
Ηλεκτρομαγνητική Παρεμβολή, ακτινοβολία: EN 60601-1-2
Ηλεκτρομαγνητική Παρεμβολή, προστασία: EN 60601-1-2
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα(EMC): CISPR 11 Class B
Βαθμολογημένες και επαγόμενες εκπομπές
Μηχανική Αντοχή: παρ. 21 EN 60601-1 (πτώση από 1 m, πρόσκρουση, βία, τραχύς χειρισμός, δόνηση)
EC directive: Class Lib

Επιλογές Διαμόρφωσης

Κωδικοί για την ημιαυτόματη έκδοση (2 κουμπιά):
SVO-B0001 για την Standard έκδοση στα 200J
SVO-B0002 για την Power έκδοση στα 360J

Κωδικοί για την αυτόματη έκδοση (1 κουμπί μόνο ON/OFF):
SVO-B0847 για την Standard έκδοση στα 200J
SVO-B0848 για την Power έκδοση στα 360J
Conf-Norm: Τυπική βασική έκδοση (αναλώσιμη μπαταρία, ηλεκτρόδια ενηλίκων, τσάντα μεταφοράς)
Conf-Rech: Διαμόρφωση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία (μπαταρία, φορτιστής, ηλεκτρόδια ενηλίκων, τσάντα μεταφοράς)

everywhere for life

CE 0051